

GEBRUIKSAANWIJZING DOUCHESTOEL MET EN ZONDER RUG

MODEL: KL4120 Shower chair without back

KL4204 Shower chair with back

Maximaal gebruikersgewicht: 137 KG.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

- Controleer alle onderdelen op externe schade voor het in elkaar zetten. Zijn er onderdelen beschadigd? Neem dan contact op met de verkoper voor verdere instructies.
- Zorg ervoor dat de veerknoppen goed vastzitten in de gaten van de ingestelde hoogte. Dit zorgt voor stabiliteit, veiligheid en een gelijke hoogte.
- Draai alle schroeven goed vast.
- Controleer de rubberen doppen aan de uitende van elke poot op of ze gescheurd zijn, versleten zijn, of ontbreken. Vervang in dat geval onmiddellijk de betreffende doppen.
- Alle vier de poten moeten altijd op gelijke hoogte afgesteld staan.
- Wanneer u de stoel gebruikt in een badkuip, zorg er dan altijd voor dat de doppen niet de zijkanten van de badkuip aanraken.
- Ga nooit op de stoel staan! Overschrijd het maximum gebruikersgewicht beslist niet!

INSTELLEN VAN DE HOOGTE:

- Druk de veerknoppen in en schuif de poten naar beneden, of naar boven.
- Wanneer de gewenste hoogte is bereikt, kunt u de veerknoppen vast laten klikken in de gaten.

MONTAGE:



- 1** Haal de onderdelen uit de doos:

Douchestoel zonder rugleuning


1. Basispoot: 2 stuks
2. Verlengstukken: 4 stuks
3. 38mm schroeven: 5 stuks
4. Zitting: 1 stuks

Douchestoel met rugleuning



5. Basispoot: 2 stuks
6. Verlengstukken: 4 stuks
7. Zitting: 1 stuks
8. Rugleuning: 1 stuks
9. 38mm schroeven: 5 stuks
10. 58mm schroeven: 4 stuks
11. L-vormige steunen: 2 stuks

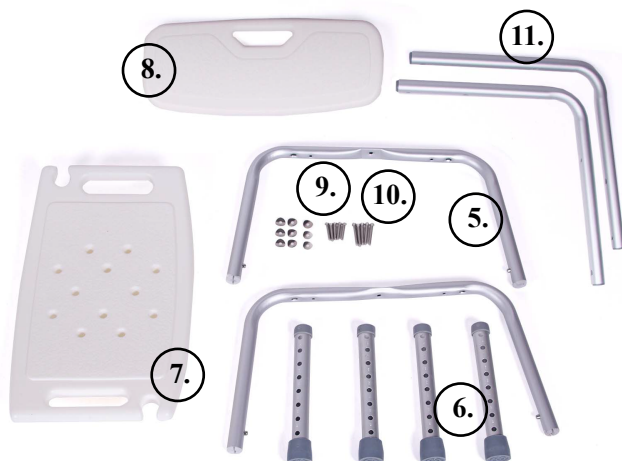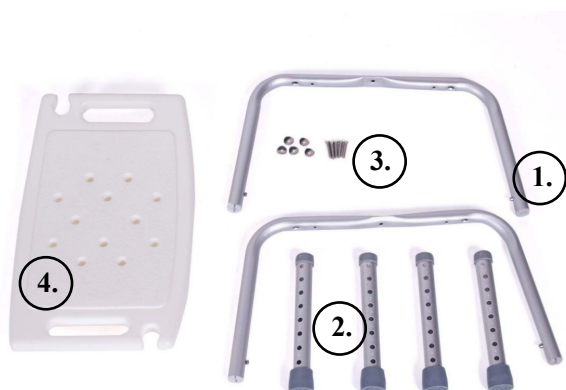

- 2** Leg de zitting van de stoel ondersteboven. Plaats de basispoot met sticker #1 in de uitkeping. Leg de basispoot met sticker #2 over de al geplaatste basispoot en schroef beide poten vast door een 38mm schroef in het midden te draaien.

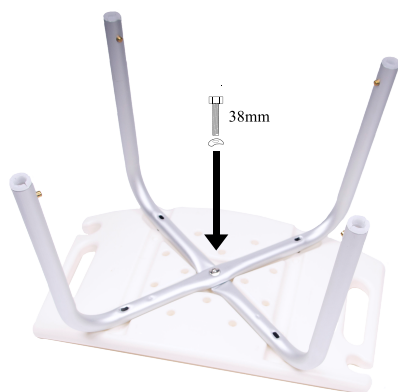

- 3** **A: Voor de douchestoel zonder rugleuning:** bevestig de poten verder aan de stoel door de resterende schroeven in de daarvoor bestemde gaten te draaien. **B: Voor de douchestoel met rugleuning:** leg de rugleuning steunen gelijk met de basispoten. Bevestig beide poten aan de zitting door alle 58mm schroeven vast te draaien. Let daarbij wel op de markering die aangeeft wat de achterkant van de zitting is.

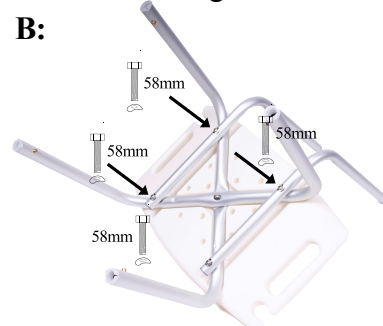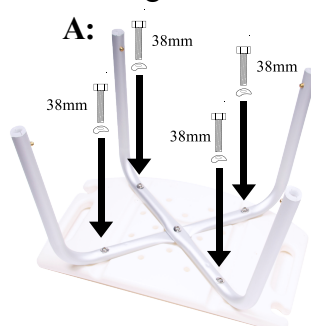

- 4** Bevestig de rugleuning van de douchestoel aan de L-vormige steunen door de resterende 38mm schroeven via deze steunen in de rugleuning vast te draaien. Controleer als u dit heeft gedaan of alle schroeven goed vast zijn gedraaid.



- 5** Schuif de verlengstukken in de basispoten door de veerknoppen in te drukken en te schuiven naar de juiste hoogte. Wanneer de juiste hoogte is bereikt kunt u de verlengstukken bevestigen door de veerknoppen in het gat te bevestigen totdat u een klik hoort. Om er zeker van te zijn dat de verlengstukken goed vast zitten, kunt u kijken of de veerknoppen uitsteken. Zoals te zien op onderstaande afbeelding.



- 6** Controleer voor gebruik of alle poten op dezelfde hoogte staan!

SCHOONMAKEN:

Maak de poten en zitting op regelmatige basis schoon met een warm sopje. Gebruik geen bleekmiddel. Controleer altijd of het gekozen schoonmaakmiddel geschikt is voor het schoonmaken van de stoelen. Gebruik geen schuursponsjes of schoonmaakdoeken met een ruw oppervlak aangezien deze producten de krukken permanent kunnen beschadigen. Veeg de zitting van de stoelen droog na elk gebruik om vlekken te voorkomen.

Technische vragen, of algemene vragen? Bel dan gratis met onze klantenservice: +31 85-2010818. Ons team helpt u graag verder!

Distributed by Podobrace B.V.
Marconistraat 9, 1131 JW Volendam

Made in China

