


Dunimed Douchekruk - in hoogte verstelbaar | Montagehandleiding

Onderdelen:

- zitting (A)
- U-vormige buis (B)
- U-vormige buis (C)
- 4 x verstelbare poot (D)
- 5 schroeven (E) + 5 ringetjes (F)

Benodigheden: Kruiskopschroevendraaier

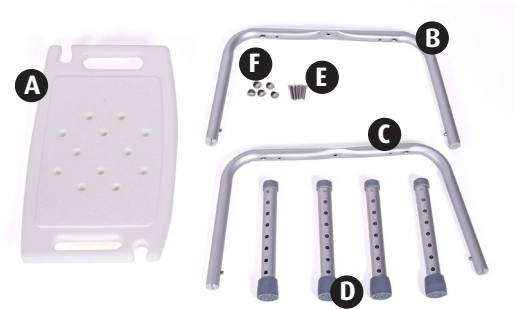

1 Stap 1: Montage onderstel

Leg de zitting (A) onderste boven op de grond. Plaats de U-vormige buis (B) schuin op de zitting in de daarvoor bedoelde uitsparing. Monteer de buis met 2 schroeven vast aan de zitting. De ringetjes plaatst u tussen de schroef en de buis.



2 Stap 2: Montage onderstel

Plaats de U-vormige buis (C) dwars op de eerste buis (B). Doordat beide buigen een inkeping bevatten vallen de buizen netjes in elkaar. Bevestig nu de tweede buis met de 3 overgebleven schroeven. Gebruik wederom de ringetjes tussen de schroef en de buis.



3 Stap 3: Poten bevestigen

Plaats de 4 poten op de buizen. Het is belangrijk dat u de poot schuin op de buis bevestigt en vervolgens met kracht verder duwt. Druk vervolgens het zilveren pinnetje in om de buis verder te schuiven tot de gewenste hoogte van de buis.



4 Stap 4: Afronding

Wanneer de 4 poten zijn bevestigd op de juiste hoogte is de Dunimed Douchekruk klaar voor gebruik.

