


Toilet Veiligheidsframe

Maximaal gebruikersgewicht: 136 KG

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Maximaal gebruikersgewicht: 136 KG

1. Draai de bouten van de toiletbril los en verwijder de toiletbril.
2. Plaats de railmontageflens op het toilet en lijn de gaten uit. Zorg ervoor dat de buis op de beugel zich het dichtst bij het reservoir bevindt (afbeelding 1).
3. Plaats de toiletbril weer terug en lijn de gaten uit (afbeelding 1).
4. Plaats de bouten terug door de gaten van de toiletbril en de beugel van het frame en bevestig het frame en de bril door de bouten aan te draaien.
5. Monteer het veiligheidsframe door de korte buis in de armbuis te steken (afbeelding 2).
6. Schuif hulprails in de beugel en bevestig deze met de ingebouwde klik knoppen.
7. Stel de rails in op de gewenste hoogte en breedte door gebruik te maken van de ingebouwde klik knoppen. Kijk voor gebruik goed na of de knoppen goed in de gaten zijn geklikt.
8. Gebruik altijd allebei de handen wanneer je jezelf laat zakken op de toiletbril, of wanneer je weer gaat staan.

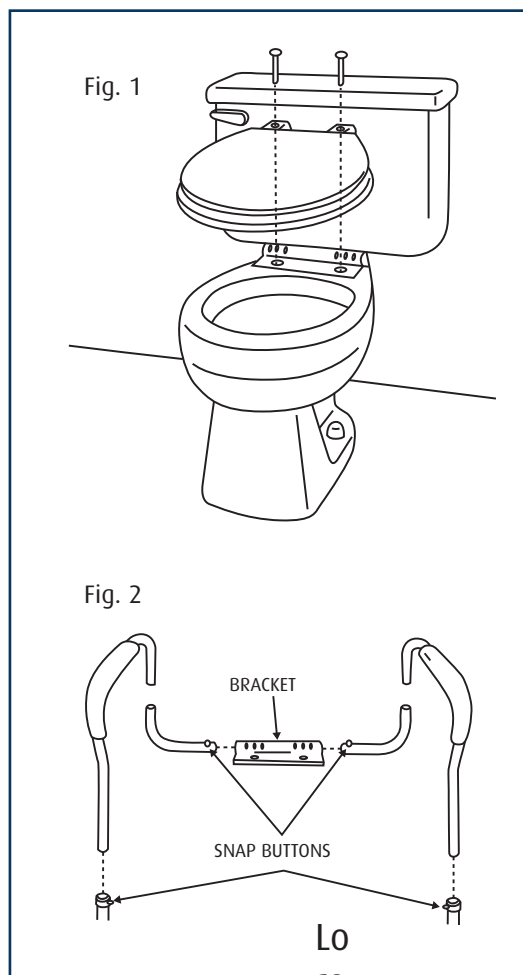

Technical support, replacement parts and warranty information?
Call +31 - 85-2010818. General product questions? Call +31 - 85-2010818

Satisfaction Guaranteed

For complete details, please visit www.podobrace.nl

Distributed by Podobrace B.V.
Marconistraat 9, 1131 JW Volendam

Made in China

